

Recovery Suit Rabbit[®]

Vêtement de récupération pour lapins • Genesungsanzug für Kaninchen • Traje de recuperación para conejos



Suitical

How to put the suit on the rabbit?


FR: Comment mettre la combinaison à votre lapin ?

DE: Wie zieht man ihrem Kaninchen den Anzug an?


ES: ¿Cómo ponerle el traje a tu conejo?



1

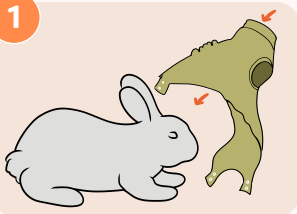

2

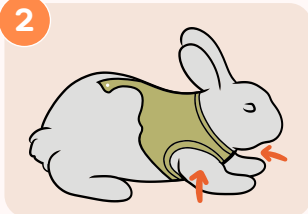


EN: Make sure that the blue inner layer is against the belly.

FR: Assurez-vous que la couche intérieure bleue est contre le ventre.


DE: Stellen Sie sicher, dass die blaue Innenschicht am Bauch anliegt.

ES: Asegúrate de que la capa interior azul quede contra el vientre.

3

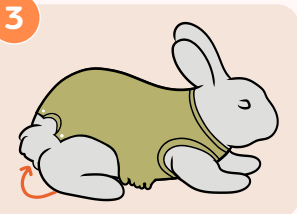

4

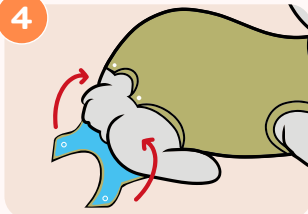

Scan for the tutorial video!

FR: Scannez pour voir le tutoriel vidéo !

DE: Scannen Sie für das Anleitungsvideo!

ES: ¡Escanea para ver el video tutorial!

links.suitical.com/insert-tutorial-recovery-suit-rabbit

Happy pet, happy life!



On the rabbit toilet

FR: Utilisation du bac à litière
DE: Bei der Benutzung der Kaninchentoilette
ES: Uso de la bandeja higiénica



EN: The suit can stay fully closed on most rabbits when using the rabbit toilet because of the specially designed opening at the rear.

FR: La combinaison peut rester entièrement fermée chez la plupart des lapins lorsqu'ils utilisent leur bac à litière, grâce à l'ouverture spécialement conçue à l'arrière.

DE: Bei den meisten Kaninchen kann der Anzug beim Benutzen der Kaninchentoilette vollständig geschlossen bleiben, dank der speziell entwickelten Öffnung an der Rückseite.

ES: En la mayoría de los conejos, el traje puede permanecer completamente cerrado mientras usan su bandeja higiénica, gracias a la abertura especialmente diseñada en la parte trasera.

Scan for product information

FR: Scannez pour plus d'informations
DE: Scannen Sie für Produktinformationen
ES: Escanea para obtener más información
links.suitical.com/insert-recovery-suit-rabbit



Washing instructions

FR: Instructions de lavage
DE: Waschanleitung
ES: Instrucciones de lavado



EN: Wash at a maximum of 90°C/194°F.
FR: Laver à une température maximale de 90 °C / 194 °F.
DE: Bei maximal 90 °C / 194 °F waschen.
ES: Lavar a una temperatura máxima de 90°C / 194°F.

EN: Do not tumble dry.
FR: Ne pas sécher en machine.
DE: Nicht im Trockner trocknen.
ES: No secar en secadora.



EN: Iron on low heat.
FR: Repasser à basse température.
DE: Bei niedriger Temperatur bügeln.
ES: Planchar a baja temperatura.

EN: Consider a second Recovery Suit, so your pet always has a clean one while washing.

FR: Pensez à un deuxième produit, pour que votre animal ait toujours un produit propre pendant le lavage.

DE: Erwägen Sie ein zweites Produkt, damit Ihr Haustier während des Waschens immer ein sauberes Produkt hat.

ES: Considera un segundo traje de recuperación, para que tu mascota siempre tenga uno limpio mientras se lava el otro.

Tips and tricks

Join the Suitical family!



@suitical #suiticalfamily



Share your recovery and win!



Sign up for our newsletter
and stay updated!